

德国BEGO 精品齿科 www.wdentallab.com

BPD完美支架系统设计图册(二)维尔德大学齿

前言

两年前,为解决医生在支架设计中的图感,我们编印了《BPD完美支架系统设计图册(一)》,该书因所 列作品体现BPD完美支架独特的生物力学设计理念和精湛的制作工艺,并配以图文并茂、装帧精美之风格,故 雨推出后颇受口腔界的欢迎,曾几度加印均无法满足各地之需。更有众多医生、技师朋友们强烈剔盼《图册 (二)》的问世,一度引领活动义齿设计的创新潮流。

为顺应医技同仁们的强烈需求,更好地促进活动义齿的设计与制作水平,在历时一年多的恶心编撰后, 《BPD完美支架系统设计图册(二)精选版》终于和大家见面了。

为使大家在阅读或使用本书时便捷顺意,附注几点说明:

- 一、《图册(二)》保留了《图册(一)》中经典设计图18款,新增30款设计图,共48款合编而成。
- 二、为便于索引,保留的原《图册 (一)》18款设计图仍沿用原书的编号,即原18款设计图在《图 (一)》和 《图册 (二)》中编号不变。
- 三、新编入的30款设计图缐用原编号体例、自A21起顺延接列、敬请留意。

编撰《BPD完美支架系统设计图册》,是我们服务中国口腔事业的一种探索,承蒙广大同仁的热情关爱和 鼓励,欣慰之余,更升华为一份责任,由此将引领我们沿着探索之路继续前行。



BEGO

历史积淀——口中经典

不莱梅人文历史源远流长,孕育了德国牙科百年知名品牌——BEGO。BPD 完美支架系统积聚百年创新元素,精镌神奇,演绎完美。

PERFECT

精选材料——国际领先

BPD完美支架系统制作十分讲究,精选BEGO支架合金,结合BEGO全系列辅助材料,使其更精密,佩戴更舒适。

DENTAL

查证系统——安全放心

确保每一副支架的可追溯性,更安全健康!

专用包装——便于消毒

配有专用包装盒,方便日常清洁、消毒及保存。





高弹性、轻、薄、舒适!



CE 0197欧盟认证 ISO 22764国际认证 FDA美国食品药品监管局 SFDA中国食品药品监管局

弹性模量[GPa]: 约220

延伸极限(Rp0.2)[MPa]: 640

维氏硬度[HV10]: 360

抗拉强度[Rm]: 940

权威中立机构出具 生物相容性证书





NO. A01 NO. A02









解削式的主连接体设计,可靠的间接固位体设计,有效的防止义齿下沉 而造成对口腔粘膜的压痛,同样适用于牙周病患者(牙周夹板)







末端游离缺失的患者的支架设计,支托放置在基牙的近中尤为重要, 能够有效地防止基牙向远中倾斜对基牙造成的损伤;美学卡环的合理 运用


















机械固位力,有效防止树脂脱落。G形卡环联合卡环的合理应用,不但 增加了义齿的固位力,而且降低了对基牙的损伤









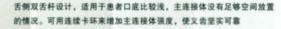





合理的支托放置。个性化的同状设计,超薄的主连接体设计。最大化搜 高病人的舒适感。充分体现BPD完美支架薄、轻的优越性能









典型的混合支持式设计,充分利用生物力学通过口腔粘膜分散病人的咬 合力,减少对病人基牙的损伤。尽量多的特患者的牙龈和基牙间限暴露 出来,最大化的保证了患者的口腔卫生






大小连接体的合理故置,最大化的保证患者的口腔卫生,合理的BEGO 成品固位网格设计,从每一个细节无不体现德国BEGO公司精益求精的 技术水平









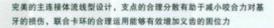







完美的流线型设计。通过完美的弧线将病人的牙龈充分暴露。能够使 病人的舌尖对牙龈有一定的按摩作用。从而保证了牙周组织的健康











基牙支持式设计,最大化的减小了主连接体的支持面积,降低了病人的 异物感和发音障碍(前提是患者的基牙条件是健康的)





应力中新式设计。大大降低较合力对基牙的损伤,合理的同状结构设 计,即使以后牙槽骨吸收,也不影响义齿的使用









合理的支托牙体制备,能减小咬合力对基牙的扭力,减少基牙的损伤。 解削式滴水状的舌杆设计,保证了大连接体强度,降低了患者的异物感,有利于自洁





活动修复体的大小设计,应尽量设计成大于患者的喉直径。患者左右两侧应用舌杆连接,切勿分开制作成小修复体而造成患者误吞隐患,引起 医疗纠纷









合理的围位体设计才能达到良好的义齿围位效果。圈形卡环的合理运 用,解决了基牙向频舌侧的倾斜,制作固位体的困难,并防止基牙进 一步向频舌侧倾斜





肯氏三类牙列缺失的设计,可以考虑用患者的基牙来较多的承担咬合力,主连接体设计可适当小巧,从而降低患者的异物感


NO. A19 NO. A20









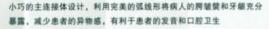





经典的联合卡环和连续性卡环设计,能够有效增加义齿的稳定性,防止 义齿翘动。前牙缺牙区V字形小连接体设计,能够起到增加机械结合 力,防止树脂脱落的作用



















将患者的腭皱完全暴露。减少患者的异物感和发音障碍

小巧的舌杆设计与连续性卡环的合理结合运用,增加主连接体强度













舌面板与美观的"I"卡环的合理运用

舌面板与邻间钩的合理组合运用,有效的防止义齿倾斜和下沉













尽量将患者的牙龈完全暴露,有利于义齿的自洁性能

可摘局部义齿与聚合瓷、烤瓷的完美结合,增加义齿的美观性













下颌前牙区连续性卡环的运用,适合下颌舌系带比较高,前牙区 舌侧无法做主连接体的患者

"1"卡环的合理放置,增加义告的美观性















前牙区舌面板的合理运用,适用于咬颌力较大,前牙塑料牙易脱落患者

完美的流线形设计,合理的支点放置













舌面板的合理设计, 适用于颌增高患者

完美的义齿密合性,充分体现出BPD完美支架系统的精度













将患者的腭皱完全暴露,减少患者的异物感和发音障碍


连续性卡环和曆、頻侧悬锁卡环的合理运用,适用于牙周夹板









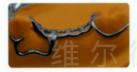






经典的BEGO下颌固位网设计,增加塑料和金属的机械结合力


完美的流线形设计。杰出的自洁效果







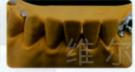

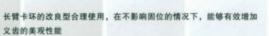





舌面板和细小舌杆组合运用,能够有效减小患者的异物感



杰出的自洁效果, 完美的舌杆形态设计
















下颌磨牙舌侧金属面的合理使用,减少患者的异物感,端加金属和树脂 的机械结合力

经典的前牙舌侧舌面板设计。前牙缺牙区可设计成聚合瓷或者烤瓷。 能够有效增加义齿的美学效果



倒钩卡环的合理使用,增加义齿的美观性能

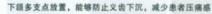









细巧的固位体制作。充分体现出BPD完美支架的金属性能,增加义齿 的美观性

















用舌侧舌面板取代舌侧主连接体设计。适用于口腔黏膜对金属过敏的 患者

合理的主连接体位置,能够有效减少咬颌力对基牙的损伤



www.wdentallab.com.com

维尔德义齿



FUSHION

上海复星医疗系统有限公司

地址:上海市ອ江北路449号9号9幅B度

电话: 400-820-7699

With www.foshion.nes